

Instrucțiuni de pregătire a probei



Genekor
Committed to Biotechnological Innovation

Proba necesară pentru Genekor este acea probă care să conțină suficiente celule din care să se poată extrage cantitatea necesară de ADN pentru analiză. Lista de mai jos a fost concepută pentru a putea lucra împreună cu scopul de a găsi cea mai bună probă pentru fiecare pacient. Ținând cont că tumorile solide variază de la pacient la pacient, există posibilitatea să întâmpinați diferite situații. Va rugăm să contactați departamentul de relații clienți pentru întrebări adiționale.

TIPUL PROBEI

BLOC DE PARAFINĂ SAU 8-10 LAMELE¹ (LAMELE H&E)

Țesutul trebuie să fie fixat cu formalină și încorporat într-un bloc de parafină. Dacă se trimit lamele, acestea trebuie să fie lamele H&E. Dacă se trimite o biopsie, se utilizează 3-5 nuclee aliniate și încorporate într-un singur bloc și trebuie să așezate astfel încât atunci când se taie, lama să fie paralelă cu axa lungă a nucleului.



SAU



1. Pentru ALK-FISH test 2-3μm. Pentru orice alt test 5-10μm

CONȚINUTUL DE ȚESUT TUMORAL

20%

Dacă cantitatea de celule maligne față de cele benigne este prea mică va fi dificilă extracția AND pentru testare. Vă rugăm să vă asigurați că proba dumneavoastră are cât se poate de mult țesut tumoral.



PENTRU PROBELE DIN FICAT:

Cel puțin At least 40% of sample should contain malignant content to ensure sufficient

Instrucțiuni de trimitere

* În timpul perioadei de vară, va recomandăm să aveți un pachet de gheață în kit (pachetul de gheață NU ar trebui să atingă direct proba).

1. În kitul oferit de Genekor, alături de proba, adăugați consimțământul informat completat cu toate detaliile pacientului și toate documentele relevante ale acestuia

2. Puneți kitul oferit de Genekor (inclusiv consimțământul informat și documentele pacientului) într-un plic sigilat.

3. Trimiteți kitul complet (consimțământ informat, copie carte de identitate, buletin histopatologic și proba) către:

Genekor Biotechnology SRL
Str. Nicolae Caramfil, Nr. 53, Sector 1, București

Adăugați toate documentele în kit și contactați departamentul relații clienți pentru a programa o comandă de preluare.

www.genekor.com

Vă rugăm contactați **0312 289 800/801** pentru orice informație sau dacă aveți nevoie de kituri noi de recoltare din partea Companiei Genekor.

ro@genekor.com