


Procedura de recoltarea probei de urină pentru testul PCA3

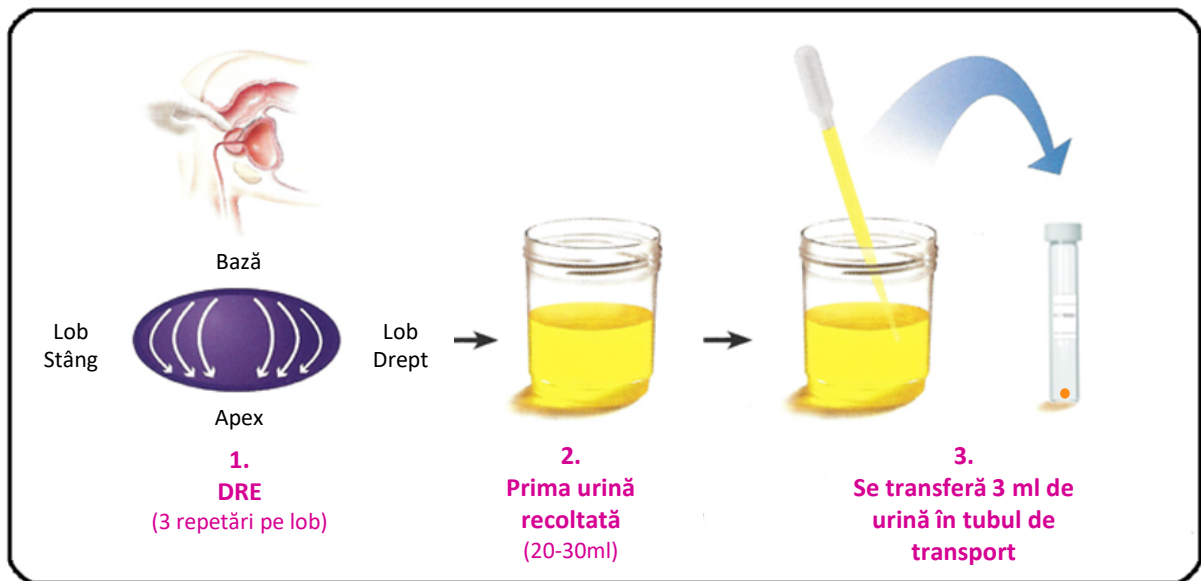

Se aplică presiune asupra prostatei suficient cât să deprime suprafața de la bază către vârf și de la linia laterală la linia mediană pentru fiecare lob, se repetă această procedură de 3 ori. Se colectează primii 30 ml de urină. Se transferă 2,5-3ml din urina colectată în tubul special oferit de Genekor.



- Transferul se face in 15 minute după recoltare.
- Lucrați în timpul colectării și manipulării cu mănuși pentru a garanta calitatea probei.



Genekor

Committed to Biotechnological Innovation

1. Recoltarea de 30 ml din prima urină.



2. Învârtiți tubul de 5 ori.



3. Transferați 2,5-3ml din urina colectată în tubul special cu ajutorul pipetei oferite.




4. Asigurați-vă că tubul este bine închis. Învârtiți de 5 ori pentru stabilizarea ARN.



6. Completați consimțământul informat.

7. Completați datele pacientului pe etichetă și lipiți-o pe tubul special de transport al probei.

* ATENȚIE, eprubetele care nu sunt etichetate cu numele complet i/ sau codul pacientul NU vor fi procesate.

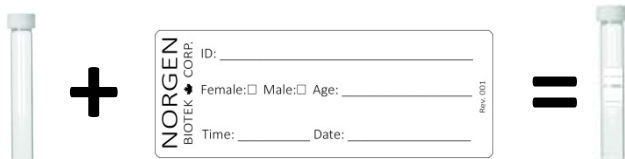

- Proba finală din tubul special de transport poate fi păstrată 5 zile la temperatura camerei.



Genekor

Committed to Biotechnological Innovation