


## PCA3-testi İdrar Numunesi Toplama Prosedürü

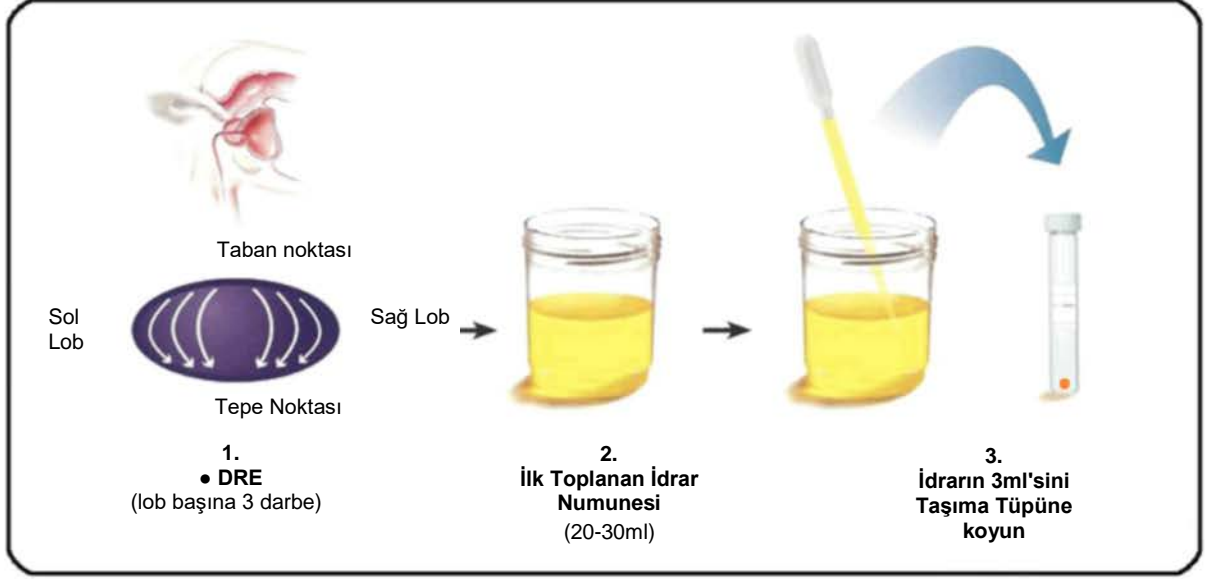

Prostata, taban noktasında olan yüzeyi tepe noktasına bastırarak ve laterali medyan çizgisine kadar bastırmaya yetecek kadar basıncı lob başına üç (3) kere olacak şekilde uygulayın. İlk 30ml idrarı DRE'den sonra toplayın. Toplanan idrarın 2,5-3ml'sini size temin edilen GeneKor kitindeki test tüpüne koyun.



- Toplamadan sonraki 15 dakika içerisinde işlenmelidir.
- Toplama ve işleme sırasında numunenin kalitesini garanti altına almak için eldiven kullanarak çalışın.



**GeneKor**

Committed to Biotechnological Innovation

1. DRE'den sonraki ilk 30ml idrarı toplayın.



2. İçinde idrar olan kabı beş kez tersine çevirin.



3. Toplanan idrarın 2,5-3ml'sini size temin edilen pipetle tüpe taşıyın.




4. Kabin güvenli bir şekilde kapandığına emin olun. RNA dengeleyicisinin karıştırabilmesi için tüpü beş kez ters çevirin.



6. İstek formunu doldurun.

7. Hasta verilerini etikete yazın ve etiketi tüpün üzerine koyun.

**\* UYARI, hastanın tam adı ve/ veya kodu ile etiketlenmemiş tüpler kabul edilmeyecektir.**

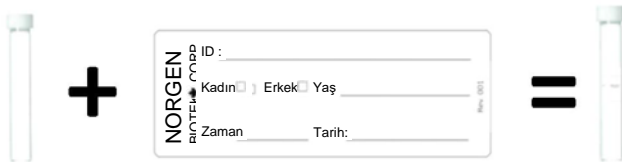

- Taşıma kabında kalan numune beş (5) güne kadar oda sıcaklığında stabil durumda kalmaktadır.



**Genekor**  
Committed to Biotechnological Innovation