

Numune Hazırlama Kılavuzu



Genekor
Committed to Biotechnological Innovation

Genekor için, çalışacağımız dokuda ki en önemli unsur, DNA analizinin gerçekleşmesini sağlayabilecek yeterli hücrenin bulunduğu bir preparata sahip olabilmektir. Bu liste, her hasta için en doğru dokunun seçilmesi konusunda bizlere yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır. Ancak, katı tümörler her bireyde büyük farklılıklar gösterebilmekte ve her hastada farklı bir sorun yaşanlabilmektedir. Bu gibi durumlarda, her türlü sorunuz için lütfen Müşteri Temsilcimizle iletişime geçiniz.

ÖRNEK TİPİ

FFPE BLOK YA DA 8-10 KESİT (+H&E KESİT)

Doku, formalinle fikslenmiş ve parafinli bir bloğa gömülü olmalı. Eğer kesit yollanılacaksa, kesitler boyanmamış ve pozitifli şarjlı olmalı ve bir adet H&E kesit içermelidir. Eğer çekirdek biyopsisi yollanıyorsa, 3-5 çekirdek tek bir blokta dizelenerek gömülmeli, bu şekilde kesit alınırken bıçak çekirdeğin uzun eksenine paralel gidiyor olmalı.



VEYA




1. ALK-FISH testi için 2-3µm. Tüm digger testler için 5-10µm

TÜMÖRÜN İÇERİĞİ

20%

ğer malign hücreler, malign olmayan hücrelere oranla çok düşük ise, dokudan yeterli DNA'nın ekstakte edilmesi zor olacaktır. Örnekte yeterli tumor dokusu bulunduğundan lütfen emin olunuz.

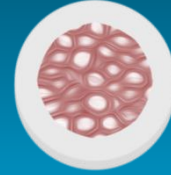

KARACİĞER ÖRNEKLERİ:

Yeterli malignant DNA elde edilebilmesi için, örnek en az %40 malignant doku içermelidir.

KARGOLAMA TALİMATLARI

* Yaz dönemi boyunca, kit içerisinde bir buz torbası bulundurmanızı tavsiye ederiz (Buz torbası, numuneye doğrudan temas ETMEMELİDİR).

1. GeneKor istek formunu ve bütün ilgili hasta sigortası materyallerini GeneKor Numune Kitine yerleştirin.

2. GeneKor Numune Kitini (GeneKor İstek Formu ve ilgili hasta raporları ve sigorta belgeleri ile beraber) belirtilen kargo paketi içerisine yerleştirin ve paketi mühürleyin..

3. Tamamlanmış numune kitini belirtilen adrese kargolayın (istek formu, sigorta bilgisi ve numuneler):

**GeneKor Biyoteknoloji
Hüsrevgerede Cad Berrin
Apt No 52 D 2
Teşvikiye İSTANBUL**

Bütün materyalleri GeneKor numune kitine yerleştirin ve Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek kargonun alınmasını

www.genekor.com

Lütfen GeneKor Numune Kiti ile ilgili istek ve sorularınızı +90 212 327 27 80'i arayarak bildirin.

tr@genekor.com