

Numune Hazırlama Talimatları



Genekor

Committed to Biotechnological Innovation

Genkor için en önemli numune değerlendirme özelliği, hücrenin bütün kütesinden gerektiği kadarını sunarak hücreden analiz için gerekli miktarda DNA ekstrakte edilebilmesidir. Bu kontrol listesi, her hastadan alınacak en iyi numuneyi beraber çalışarak belirlememize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ancak, katı tümör numuneleri hastadan hastaya çok fazla değişiklik gösterirler, ve karşınıza bu kapsamda bahsedilmemiş özel zorluklar çıkabilir. Lütfen başka herhangi bir sorunuz varsa Müşteri Hizmetleri Temsilcimiz ile bağlantı kurun.

NUMUNE TİPİ

KAN NUMUNESİ

Kan, EDTA tüplerinin içine toplanmalıdır. Test için en az iki flakon gerekmektedir. Kan toplama seçtiğiniz herhangi bir yetkili merkezde yapılabilir. Kan toplama işlemini Genekor kendi tesislerinde veya herhangi bir lokasyonda gerçekleştirmemektedir.



KAN NUMUNESİ DEPOLAMA

Kan numunesi evinizdeki buzdolabında 4°C'ta saklanabilir.

*Numuneyi DONDURMAYIN.



Dondurmayın

KARGOLAMA TALİMATLARI

* Yaz dönemi boyunca, kit içerisinde bir buz torbası bulundurmanız tavsiye ederiz (Buz torbası, numuneye doğrudan temas ETMEMELİDİR).

1. GeneKor istek formunu ve bütün ilgili hasta sigortası materyallerini GeneKor Numune Kitine yerleştirin.

2. GeneKor Numune Kitini (GeneKor İstek Formu ve ilgili hasta raporları ve sigorta belgeleri ile beraber) belirtilen kargo paketi içerisinde yerleştirin ve paketi mühürleyin..

3. Tamamlanmış numune kitini belirtilen adrese kargolayın (İstek formu, sigorta bilgisi ve numuneler):

**GeneKor Biyoteknoloji
Hüsrevgerede Cad Berrin
Apt No 52 D 2
Teşvikiye İSTANBUL**

Bütün materyalleri GeneKor numune kitine yerleştirin ve Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek kargonun alınmasını

* **UYARI**, hastanın tam adı ve/ veya kodu ile etiketlenmemiş tüpler kabul edilmeyecektir.

www.genekor.com

Lütfen GeneKor Numune Kiti ile ilgili istek ve sorularınızı +90 212 327 27 80'i arayarak bildirin.

tr@genekor.com